

Información en tiempo real para tomar mejores decisiones, más rápido.



Obtenga la información en tiempo real y segura necesaria para maximizar el uso del sistema, minimizar las interrupciones de servicio y evaluar el desempeño del personal con el servicio de monitoreo AeroRemote™ para los sistemas Konica Minolta AeroDR®. Esta solución de monitoreo activo basada en la nube detecta e informa problemas de desempeño críticos y en curso, y proporciona informes automáticos que pueden ser revisados en cualquier lugar. Esto le permite actuar en situaciones urgentes inmediatamente y abordar inconvenientes potenciales del sistema o de usuarios antes de que se conviertan en problemas.

Monitoreo activo

El monitoreo en tiempo real de parámetros y eventos del sistema (desde la detección de caídas hasta el desempeño de los componentes) le permite tomar decisiones de apoyo mejor fundamentadas con mayor rapidez, a la vez que fomenta el manejo adecuado por parte del usuario. Es mejor para sus pacientes y para su consultorio.

Notificaciones en vivo

Reciba alertas por correo electrónico instantáneas cuando ocurren eventos urgentes, como paneles caídos¹. Responda inmediatamente y de manera eficaz, minimizando el tiempo fuera de servicio y las interrupciones.

Generación de informes de uso

Los informes mensuales detallan el uso del sistema y la productividad del personal para proporcionar información instantánea le ayudan a operar con mayor eficacia, respaldan las mejores prácticas para los usuarios y aprovechan al máximo sus activos de diagnóstico por imágenes AeroDR. Los informes proporcionan detalles por sistema y por usuario:

- Recuentos de caídas de paneles
- Indicadores de salud de componentes
- Notificaciones OS
- Recuentos de examen
- Rechazo/repetición de análisis
- Estadísticas del nivel de exposición

AeroRemote™: Una solución de monitoreo activo completa para su sistema AeroDR®.

Detección de caídas de paneles automatizada, diagnóstico y reemplazo

Con AeroRemote, recibirá una notificación por correo electrónico en tiempo real cuando un panel AeroDR se caiga o golpee. La estación de control de AeroDR indica a los usuarios que ejecuten una herramienta de verificación de panel que proporciona un resultado inmediato.

Si el panel está dañado, se entrega un reemplazo inmediato². Incluso la instalación es rápida y fácil. Simplemente inserte el panel de AeroDR de reemplazo en la estación de anclaje, seleccione la opción Reemplazo rápido y siga las instrucciones. En cuestión de minutos estará listo para su próximo paciente.




Informes mensuales a los que puede acceder desde su portal seguro

Caída de paneles, niveles de exposición, recuentos de rechazos y más, un menú completo de informes que lo mantiene informado acerca de la productividad del sistema y el operador.



Herramienta de diagnóstico ejecutada por el usuario

Simplifica el diagnóstico con una herramienta de verificación de panel operada por el usuario

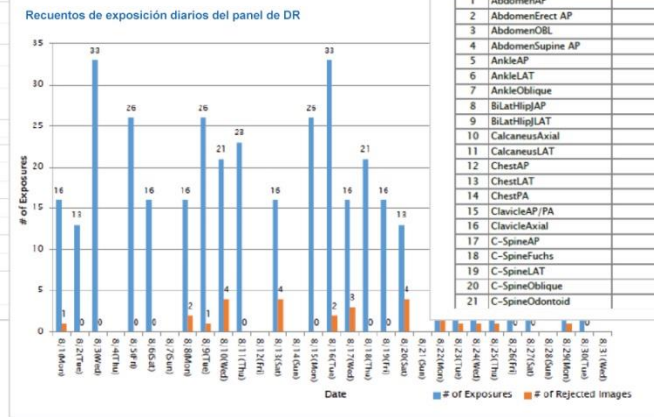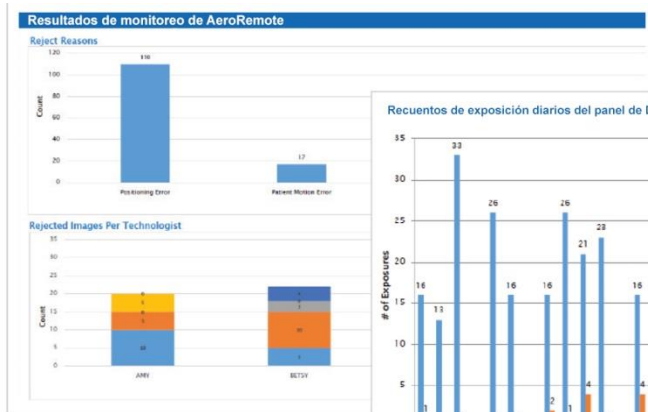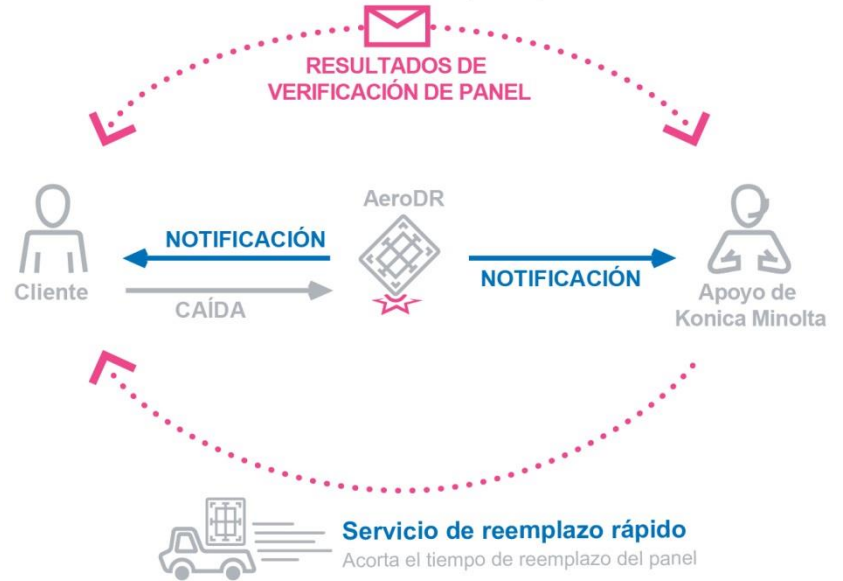

Resultados de monitoreo de AeroRemote					
Exposure Levels					
No	Body Part	# of Exposures	Average S Value	Average EI Value	Average DI Value
1	AbdomenAP	24	299	916.05	-0.39
2	AbdomenErect AP	35	613	555.77	-1.70
3	AbdomenOBL	15	506	280.25	-3.47
4	AbdomenSupine AP	71	323	721.82	-0.67
5	AnkleAP	48	516	194.26	-1.81
6	AnkleLAT	52	263	406.08	1.47
7	AnkleOblique	52	462	243.01	-1.08
8	BiLatHipJAP	12	1,102	167.74	-5.62
9	BiLatHipLAT	10	329	178.69	-2.40
10	CalcaneusAxial	5	231	979.77	2.00
11	CalcaneusLAT	4	177	438.02	2.03
12	ChestAP	140	215	601.93	2.80
13	ChestLAT	425	314	331.57	-1.36
14	ChestPA	383	404	323.06	0.21
15	ClavicleAP/PA	5	300	209.84	-2.30
16	ClavicleAxial	5	301	184.42	-2.55
17	C-SpineAP	37	263	525.81	1.71
18	C-SpineFuchs	6	403	93.53	-5.10
19	C-SpineLAT	33	187	565.22	2.10
20	C-SpineOblique	2	384	215.90	-1.43
21	C-SpineOdontoid	69	396	165.70	-3.79

1. La detección automatizada de caídas de paneles no está disponible en todos los modelos.
2. Corresponden copagos u otros cargos por el reemplazo de paneles, según el nivel del contrato de servicios. Pueden corresponder cargos por entrega en el día.

- AeroRemote requiere un sistema con CS-7, versión 1.21 o superior.

AeroDR es marca comercial registrada y AeroRemote es marca comercial de Konica Minolta, Inc.
© 2016 Konica Minolta Healthcare Americas, Inc.



Konica Minolta Healthcare Americas, Inc.
411 Newark Pompton Turnpike
Wayne, New Jersey 07470
Tel: (973) 633-1500 Fax: (973) 523-7408
konicaminolta.com/medicalusa

M1132 617 RevA